

**Menos trabajo,  
mejor resultado  
Mínimo esfuerzo,  
máximo resultado**

Tiempo ganado y un brillo aumentado:  
El nuevo set HATHO ThermoPol acelera  
y mejora el acabado de prótesis dental  
termoplástico.

Risparmiate tempo e aumentate la brillan-  
tezza: Il nuovo set HATHO ThermoPol  
migliora la superficie delle protesi termo-  
plastiche nel modo più rapido.



Ref. no. 313203  
Ref. no. 313203

2 x art. no. 4280  
HATHO cepillo con entretelas ø 80 mm  
2 x art. no. 4280:  
HATHO Multistrato ø 80 mm  
1 x ref. no. 313168:  
HATHO Polistar Lintygrigio 90 g  
1 x ref. no. 313168:  
HATHO Polistar Lintygrigio 90 g  
1 x art. no. 869 100/14:  
HATHO COSIMA Soft disco de pulido  
ø 100 mm  
1 x art. no. 869 100/14:  
HATHO Cosima ø 100 mm  
1 x ref. no. 313200:  
HATHO Polistar Crema 90 g  
1 x ref. no. 313200:  
HATHO Polistar Crema 90 g  
1 x art. no. 868 4" x 50 H:  
HATHO MIRA disco de pulido ø 100 mm  
1 x art. no. 868 4" x 50 H:  
HATHO Mira ø 100 mm  
1 x ref. no. 313196:  
HATHO Polistar Pro Rosa 150 g  
1 x ref. no. 313196:  
HATHO Polistar Pro Rosa 150 g

**1 Prepolido  
Pre-lucidatura**



**El secreto  
del prepolido**

- ★ Fijan el cepillo con entretelas HATHO art. no. 4280 en su máquina de pulido.
- ★ Ajustan la velocidad a 1.400 min<sup>-1</sup>.
- ★ Mantienen la pasta de prepolido, HATHO Polistar Lintygris ref. no. 313168, al cepillo rotador por aprox. 2 segundos y adjuntan algo abrasivo suplemental.
- ★ Pulian uniformemente toda la superficie del prótesis dental thermoplástico por aprox. 3 a 4 minutos hasta todos los desalineamientos estan alejados.

- ★ Terminan el primer paso con la limpieza de la pieza a trabajar.

**Il segreto  
della prelucidatura**

- ★ Inserire sulla pulitrice la spazzola HATHO multistrato art. no. 4280.
- ★ Regolare la velocità bassa (1.400 giri/min).
- ★ Per saturare la spazzola multistrato con maggior agente abrasivo, passare la barretta di pasta HATHO Polistar Lintygrigio ref. no. 313168 sulla spazzola mentre ruota per circa 2 secondi.

- ★ Utilizzare la spazzola arricchita di pasta per lucidare la superficie della protesi termoplastica per circa 3-4 minuti, fino a quando sarà liscia.

- ★ Terminare la prima fase come al solito, pulendo la protesi.

**El nuevo set  
HATHO ThermoPol**


Rápido, un pulido reluciente:  
3 pasos, 3 ventajas, 3 ganadores

**Il nuovo set  
HATHO ThermoPol**

Lucidatura ultrarapida per risultati  
eccezionali: 3 fasi, 3 benefici, 3 vittorie



**2 Pulido  
Lucidatura**

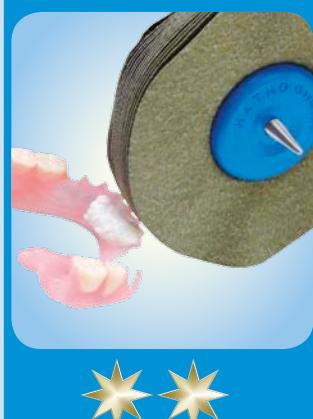

**La aproximación  
del pulido**

- ★ Fijan el cepillo HATHO COSIMA Soft disco de pulido art. no. 869 100/14 en su máquina de pulido.
- ★ Ajustan la velocidad de 1.400 min<sup>-1</sup>.
- ★ Aplican, según necesidad, aprox. 1 cm HATHO Polistar Crema ref. no. 313200 al prótesis dental thermoplástico prepolido.
- ★ Pulian suavemente y uniformemente toda la superficie del prótesis dental por aprox. 3 a 4 minutos hasta todos los rasgu os finos estan alejados.

- ★ Terminan el segundo paso con la limpieza de la pieza a trabajar.


**La tecnica  
di lucidatura**

- ★ Inserire sulla pulitrice la spazzola lucidante HATHO Cosima art. no. 869 100/14.
- ★ Regolare la velocità bassa (1.400 giri/min).
- ★ Appicare circa 1 cm. di HATHO Polistar Crema ref. no. 313200 sulla protesi che è stata prelucidata come sopra.

- ★ Lucidare delicadamente ed uniformemente la protesi per circa 3-4 minutos, finché non scompare ogni più piccolo segno.

- ★ Terminare la segunda fase como al solito, puliendo la protesi.

**3 ventajas, 3 ganadores  
3 benefici, 3 vittorie**

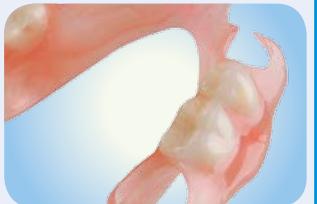


Todo el mundo benefician del resultado perfecto: el protésico, el dentista y el paciente

Tutti beneficiano di risultati perfetti:  
Lodontotecnico, il dentista e anche il paziente



**3 Abrillantado  
Brillantatura**

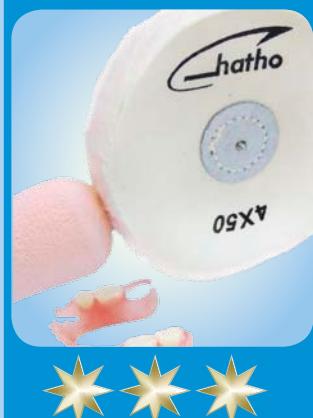

**El descubrimiento  
del abrillantado**

- ★ Fijan el cepillo HATHO MIRA disco de pulido art. no. 868 4" x 50 H en su máquina de pulido.
- ★ Ajustan la velocidad de 1.400 min<sup>-1</sup>.
- ★ Mantienen la pasta de abrillantado, HATHO Polistar Pro Rosa ref. no. 313196, al cepillo rotador por aprox. 2 segundos y adjuntan algo abrasivo suplemental.
- ★ Pulian uniformemente toda la superficie del prótesis dental por aprox. 3 a 4 minutos hasta un grado de brillo aparece que ya conocen del prótesis dental PMMA.

- ★ Terminan el tercero paso con la limpieza de la pieza a trabajar.

**Alérgren se del mejor resultado  
que ustedes han realizado en  
poco tiempo por el tratamiento  
de un prótesis dental thermo-  
plástico**

**La scoperta  
della brillantatura**

- ★ Inserire la spazzola lucidante HATHO Mira art. no. 868 4" x 50 sulla pulitrice.
- ★ Regolare la velocità bassa (1.400 giri/min).


- ★ Passare la barretta HATHO per brillantare Polistar Pro Rosa ref. no. 313196 contro la spazzola mentre ruota per circa 2 secondi.

- ★ Lucidare la superficie della protesi delicadamente ed uniformemente per circa 3-4 minutos. La protesi adquirirá un grado de brillantezza que prima era lograble solo con las protesis en acrilico!

- ★ Terminare la terza fase como al solito, puliendo la protesi.

- ★ Godetevi el mejor resultado  
obtenible nella lucidatura delle  
resine termoplastiche nel più  
breve tiempo posible.

**Rápido, un pulido reluciente  
Brillantatura in tempi record**

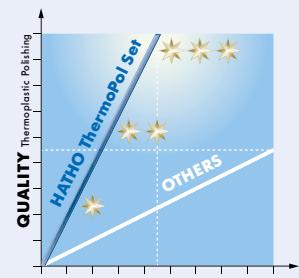

Ventajas culminantes en el acabado de prótesis dental termoplástico: un brillo máximo en un tiempo mínimo.

Eccezionali vantaggi nella lucidatura delle protesi termoplastiche: Massima brillantezza nel minor tempo possibile.



## El duro para primero

### Abrasivi potenti per iniziare



HATHO cepillo de entretelas con 2 hileras de cerda de Chung King Blanca y 2 entretelas de Scotch Brite™. ø 80 mm, con el centro de plástico HATHO Unfix por un mejor centraje y fijación. Adecuado para 3.500 min<sup>-1</sup>.

Cepillo de prepulido profesional para el prepulido de prótesis dental (PMMA), Thermoplástico (nylon), 3D-acrilatos (rapid prototyping) y plásticos fotopolimerización.

Componente del nuevo set HATHO ThermoPol. Se vende por separado. Embalaje: 12 piezas.

HATHO art. no. 4280

## El blando para el fino

### Spazzola soffice per lucidare uniformemente



HATHO COSIMA Soft disco de pulido con 14 hileras de tejido blando de algodón siliconado, con centro plástico ø 100 mm, adecuado para 3.500 min<sup>-1</sup>.

Disco de pulido profesional para el abrillantado de prótesis dental (PMMA), Thermoplástico (nylon), 3D-acrilatos (rapid prototyping) y plásticos fotopolimerización titan, aleaciones de metales preciosas y non-presiosas.

Componente del nuevo set HATHO ThermoPol. Se vende por separado. Embalaje: 1 pieza.

HATHO art. no. 869 100/14

## El tierno para lo mejor

### Lucidatura delicata per il miglior risultato



HATHO MIRA cepillo para el pulido fino de 50 capas de tejido de algodón natural, ø 100 mm, sin costuras, con capacidad para 3.500 rev/min.

Disco de pulido profesional para el abrillantado de prótesis dental (PMMA), Thermoplástico (nylon), 3D-acrilatos (rapid prototyping) y plásticos fotopolimerización, armazones, titan, aleaciones de metales preciosas y non-presiosas.

Componente del nuevo set HATHO ThermoPol. Se vende por separado. Embalaje: 1 o 10 piezas.

HATHO art. no. 868 4" x 50 H

Spazzola HATHO Multistrato da 80 mm. Con due strati esterni di setola bianca Chungking e due strati interni di Scotch-Brite, con il nottolino centrale in plastica HATHO Unifix per un miglior fissaggio alla lucidatrice. Adatta per velocità fino a 3.500 giri/min.

Spazzola professionale per la pre-lucidatura di protesi in acrílico (PMMA), termoplastica (Nylon), Acrílicos 3D (prototipación rápida) e resinas polimerizables.

Fa parte del nuovo set HATHO ThermoPol. Disponible anche separatamente in confezione da 12 pezzi.

HATHO art. no. 4280

## El fino para el grueso

### Abrasivo a grana fine per smussare le imperfezioni



HATHO Polistar Lintygris pasta de pulido con mixtura de cera blanda y con graneado fino, Peso 90 g.

Abrasivo profesional para el prepulido de prótesis dental (PMMA), Thermoplástico (nylon), 3D-acrilatos (rapid prototyping) y plásticos fotopolimerización.

Componente del nuevo set HATHO ThermoPol. Se vende por separado. Piezas de 90 g, 300 g o 1,2 kg.

HATHO ref. no. 313168 (90 g)  
HATHO ref. no. 313175 (300 g)  
HATHO ref. no. 313150 (1,2 kg)

Barretta di pasta HATHO Polistar Lintygrigio composta da cera morbida e abrasivo a grana fine.

Agente lucidante profesional per la prelucidatura di protesi in acrílico (PMMA), termoplastica (Nylon), Acrílicos 3D (prototipación rápida) e resinas polimerizables.

Fa parte del nuovo set HATHO ThermoPol. Disponible anche separatamente in confezione da 90 gr., 300 gr. e 1,2 Kg.

HATHO ref. no. 313168 (90 g)  
HATHO ref. no. 313175 (300 g)  
HATHO ref. no. 313150 (1,2 kg)

## El cremoso para el brillo

### El cremoso para el brillo

#### Crema lucidante per una brillantezza eccezionale



HATHO Polistar Crema, llena con graneado fino, peso 90 g.

Crema de pulido profesional para el brillo de prótesis dental (PMMA), Thermoplástico (nylon), 3D-acrilatos (rapid prototyping) y plásticos fotopolimerización, titan, aleaciones de metales preciosas.

↳ Sin tensioactivo, sin disolvente.

Componente del nuevo set HATHO ThermoPol. Se vende por separado. Embalaje: 1 pieza.

HATHO ref. no. 313200

HATHO Polistar Crema da 90 gr., arricchita da abrasivo a grana fine.

Crema lucidante profesional per la lucidatura di protesi in acrílico (PMMA), termoplastica (Nylon), Acrílicos 3D (prototipación rápida), resinas polimerizables e leghe preziose.

↳ Sin tensioactivo né solventi.

Fa parte del nuovo set HATHO ThermoPol. Disponible anche separatamente in confezione singola.

HATHO ref. no. 313200

## Lo mejor para el acabado

### Per la brillantatura perfetta



HATHO Polistar Pro Rosa pasta de pulido. Pasta de pulido para el abrillantado, hecho a mano, con graneado ultrafino, peso 150 g.

Pasta de pulido profesional para el abrillantado de prótesis dental (PMMA), Thermoplástico (nylon), 3D-acrilatos (rapid prototyping) y plásticos fotopolimerización.

Componente del nuevo set HATHO ThermoPol. Se vende por separado. Embalaje: 1 pieza.

HATHO ref. no. 313196

Pasta HATHO Polistar Pro Rosa, barra da 150 gr. di pasta con abrasivo a grana ultra fine.

Pasta profesional per la brillantatura di protesi in acrílico (PMMA), termoplastica (Nylon), Acrílicos 3D (prototipación rápida) e resinas polimerizables.

Fa parte del nuevo set HATHO ThermoPol. Disponible anche separatamente in confezione singola.

HATHO ref. no. 313196

## Printed in Germany 2014 / ID. Nr. 318086